



Bursch®

There is no substitute for quality

Let's workflow it

... mit dem Zirkon Workflow Set von der Weißlingsbearbeitung bis zur Politur alles in einem Set.

... with the zircon workflow set from processing pre-sintered zirconia to polishing all in one set.



Bearbeitung des Weißlings vor dem Sintern

Processing of pre-sintered zirconia


Step 1

Weißlingsbearbeitung und Politur

- Raustrennen, Verputzen, Strukturieren mit Keramik-Fräsern
- Polieren mit dem 2 in 1 Polierer mittel/fein

processing and polishing pre-sintered zirconia

- separating, plastering, structuring with ceramic cutters
- polishing with the 2 in 1 polisher medium/fine

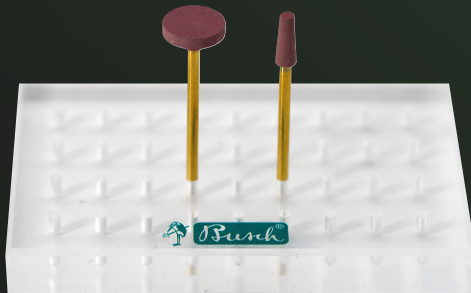

Bearbeitung der gesinterten Restauration

Processing of sintered restorations

Step 2

Diamantdurchsetzte Schleifkörper

- **ohne** Wasserkühlung einsetzbar
- Ausdünnen von Rändern, Formkorrekturen

diamond interspersed abrasives

- to be used **without** water cooling
- thinning of edges, shape corrections



Step 3

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung

filigrane Feinkorrekturen:

- grün, schwarz: grobe Körnung
- rot, rot: feine Körnung

ZIRAMANT instruments with special diamond coating

filigree fine corrections:

- green, black: coarse grit
- red, red: fine grit



Step 4

Diamantdurchsetztes Poliersystem

Politur - 2-stufig

1. türkis, gelb: mittel
2. rosa, gelb: fein

diamond interspersed polishing system

polishing - 2-step

1. turquoise, yellow: medium
2. pink, yellow: fine



Step 5

Bürste und Diamant-Polierpaste


- Hochglanzpolitur mit 3µ Diamantpaste

brush and diamond-polishpaste

- high shine polishing with 3µ diamond paste

Plexiglassockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Acrylic glass base not included in delivery.

5440 Zirkon Workflow Set

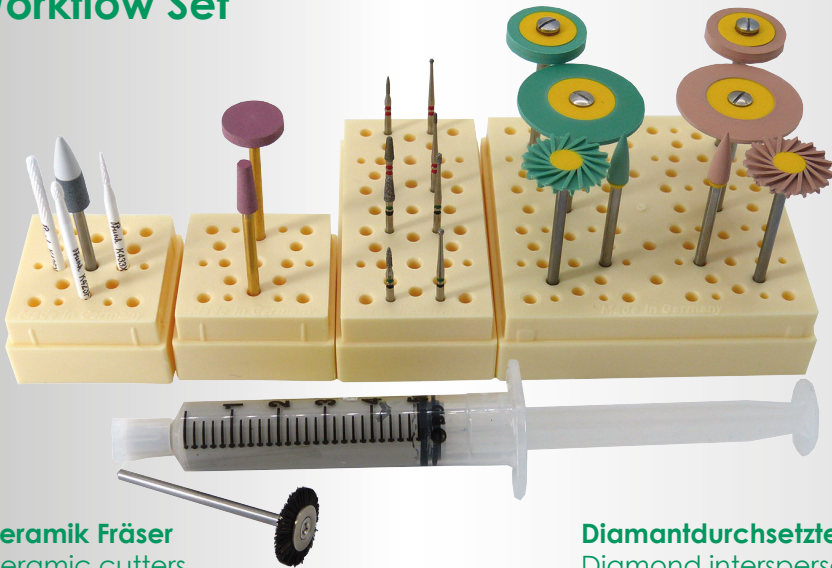

2 in 1 Polierer / KERA Keramik Fräser
2 in 1 polisher / KERA ceramic cutters


Step 1



HST/HP	9800	K433X	K426X	K423FX
ISO Ø	055	016	023	023

Diamantdurchsetzte Schleifkörper
Diamond interspersed abrasives

Step 2

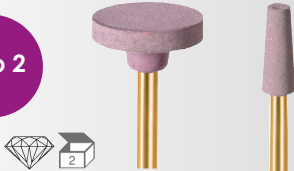

HST/HP	D702	D723
ISO Ø	120	040

ZIRAMANT Schleifer mit Spezialdiamantierung
ZIRAMANT instruments with special diamond coating


Step 3



FG lg	6855Z	6860Z	8855Z	8860Z	FG x-lg	6801LZ	6838LZ	8801LZ	8838LZ
ISO Ø	025	014	021	010	ISO Ø	014	012	011	009

2-stufiges diamantdurchsetztes Poliersystem
2-step diamond interspersed polishing system

Step 4

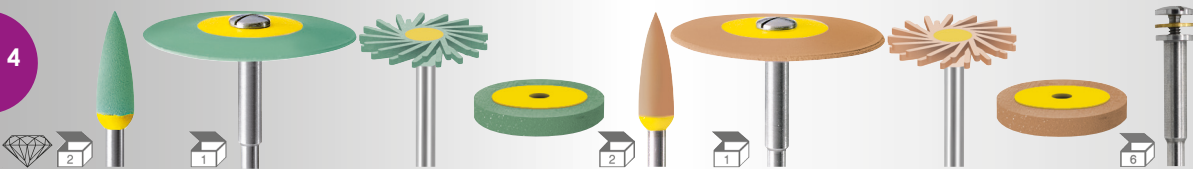

HST/HP	9854	9853	9855		9864	9863	9865		305RS
unmontiert unmounted				9856				9866	
ISO Ø	040	260	170	170	040	260	170	170	050


Pferdehaarbürste, harte Borsten
Horsehair, hard bristles

Step 5



HST/HP	9736
ISO Ø	140

Hochglanzpolierpaste, Diamant (3µ)
High shine polishing paste, diamond (3µ)

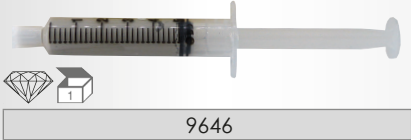

9646